

Cast Separator

Agent de séparation servant à l'isolation de moules conçus par fabrication générative à base de (méth)acrylates contre le silicone A

Processus de mise en œuvre

1. Porter des gants et des lunettes de protection lors de l'utilisation de **Cast Separator**.
2. Immerger les moules conçus par fabrication générative dans la solution prête à l'emploi à l'aide d'une pincette
3. Évacuer à l'air comprimé les résidus d'agent de séparation (excédents) suite à l'immersion.
4. Laisser sécher les moules isolés à température ambiante ($23\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$) pendant 30 min.
ALTERNATIVE : les moules peuvent être séchés dans le four à 40 °C pendant environ 15 min.
6. Après le séchage, remplir le moule avec du silicone. (Recommandation : **detax software®**).

Traitement

- ▶ Prévoir un système d'aspiration pendant la mise en œuvre de quantités importantes.

Sécurité

- ▶ Suivre les indications de la fiche de données de sécurité.
- ▶ Utiliser un équipement de protection individuelle (gants et lunettes de protection) pendant le travail.
- ▶ Éviter tout contact direct avec le matériau liquide. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
- ▶ Ne pas inhaler les vapeurs.

Stockage

- ▶ Stocker **Cast Separator** à $15\text{ °C} - 25\text{ °C}$.

Généralités

- ▶ Après usage, refermer immédiatement le récipient avec soin et toujours le conserver hermétiquement fermé.

Indication :

Agent de séparation pour moules

Coloris du produit :

incolore

Références de commande :

Cast Separator
Flacon de 500 ml **03636**

luxaprint® 3D cast UV
Récipient de 1000 g
vert-transparent **03520**

detax software® Système Automix2

Emballage des cartouches
clair-transparent **03504**
8 x 50 ml cartouches

rose-transparent **03506**
8 x 50 ml cartouches

rouge-transparent **03505**
8 x 50 ml cartouches

bleu-transparent **03507**
8 x 50 ml cartouches

Canules de mélange
jaune **02706**
Emballage de 48 pc.

Pointes de façonnage, jaune **02712**
Emballage de 96 pc.

Pistolet de mélange **02699**
1 pc.

software coat **03509**
Flacon en aluminium de 500 ml

Traitement :

à $23\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$

Stockage



Plus d'informations sur
www.detax.de

Cast Separator a été conçu pour un usage dans le secteur des appareils auditifs et doit être appliqué conformément aux instructions de traitement et aux mesures de précaution. DETAX décline toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation incorrecte ou impropre du matériau.

DETAX

GmbH & Co. KG
Carl-Zeiss-Str. 4 · 76275 Ettlingen/Germany
Telefon: 07243/510-0 · Fax: 07243/510-100
www.detax.de · post@detax.de

Made in
Germany

09/2014