



Description du produit

Matière plastique fluide photopolymérisable pour le surmoulage des oreillettes et coques dures.

Traitement

Nous recommandons le port de gants en caoutchouc en guise de protection pendant le traitement de FotoScreen.

FotoScreen est une peinture monocomposant pour le surmoulage d'oreillettes ou de coques en plastique. La surface en plastique n'a pas besoin de traitement particulier. Avant la peinture, la surface doit être dépoussiérée et dégraissée. Pour obtenir un meilleur comportement de moulage, il est recommandé de dépolir la surface en plastique. Une oreillette ou coque déjà portée devrait être prétraitée avec un liquide de nettoyage (p. ex., le n° de commande 471).

FotoScreen peut être appliqué à l'aide d'un pinceau. Sinon, l'on peut procéder à la peinture par plongée. À cet égard, il faut éviter l'apparition de bulles d'air. La couche de peinture devrait être la plus mince possible. Si l'on souhaite une couche plus épaisse, l'on devrait réaliser deux couches de peinture. Il est alors avantageux d'exposer brièvement la première couche de peinture mince avant d'appliquer une deuxième couche qui sera ensuite totalement polymérisée.

Unité de post-durcissement	Durée de traitement
PCU Evo	2 min (sans gaz protecteur)
Polylux 2000	2 min
Polylux 1000N	2 min (sans gaz protecteur)
Polylux 500	5 min
Polylux Karusell	3 min
Sonolux Flash Evo	2 min
Polylux LED	1 min

N'exposez en aucun cas à la lumière le produit liquide pour ne pas détériorer la qualité du produit. Les écarts par rapport au processus de fabrication présenté peuvent entraîner des modifications des propriétés mécaniques et des déviations de couleurs du produit FotoScreen.

Risques possibles

Pendant l'utilisation de FotoScreen, respectez la fiche de données de sécurité.

Avertissements

H225 Liquide et vapeur très inflammables.
H315 Provoque des irritations cutanées.
H319 Provoque une grave irritation oculaire.
H317 Peut provoquer des réactions cutanées allergiques.
H335 Peut irriter les voies respiratoires.
H412 Nocif à long terme pour les organismes aquatiques.

Consignes de sécurité

P210 Conserver à l'écart de la chaleur, surfaces chaudes, étincelles, flammes nues et autres sources d'inflammation. Ne pas fumer.
P241 Utiliser des appareils électriques antidéflagrants / dispositifs d'aération / systèmes d'éclairage.
P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : retirer aussitôt tous les vêtements contaminés et trempés. Laver la peau à l'eau / à la douche.
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : laver prudemment à l'eau pendant quelques minutes. Retirer les lentilles de contact le cas échéant si possible. Continuer à laver.
P405 Conserver sous clé.
P501 Élimination du contenu / du récipient conformément aux règles locales / régionales / nationales / internationales.

Contient : méthacrylate de méthyle, acide prop-2-énoïque, produits de réaction avec dipentaérythritol, oxyde de (2,4,6-triméthylbenzoyl)diphénylphosphine.

N° de commande : FotoScreen 0805 20 ml
incolor transparent 0806 50 ml
0807 250 ml

Numéro de lot / Date de péremption : le numéro de lot et la date de péremption sont indiqués sur chaque emballage de FotoScreen. Veuillez toujours indiquer dans les réclamations le numéro de lot du produit. N'utilisez pas le produit après l'expiration de la date de péremption.

Dreve Otoplastik GmbH décline toute responsabilité des dommages causés à l'utilisation incorrecte du produit.



Danger

